



Bitte lächeln!

Invisalign Teen ist da*

*Jetzt kannst du endlich
auch während der
Behandlung lächeln.



Invisalign Teen™

Die ideale Alternative zur Zahnspange für Teenager-Patienten von heute!

transparent . komfortabel . effektiv

invisalign® | teen



invisal

*Fast eine Millionen
auf der Welt
mit Invisalign*

ign[®]

teen – klare Sache!

Dein Telefon ist drahtlos. Dein Computer ist drahtlos. Warum nicht auch deine Zahnsperange?

Willkommen im 21. Jahrhundert.

Das neue Invisalign Teen: gerade Zähne, ganz ohne häßliche Drähte.

Invisalign Teen ist die **klare** Alternative zu herkömmlichen **Zahnsperangen**. Es ist transparent, **komfortabel** und was noch viel besser ist, es ist **nahezu unsichtbar** – kaum jemand wird sehen, dass du eine Zahnsperange trägst.


Die Farbe zeigt, wo's langgeht!
Du kannst die Tragezeit der Aligner leicht kontrollieren – je länger du sie trägst, desto blässer wird die blaue Farbe.



Menschen wurden schon behandelt...

Im Gegensatz zu herkömmlichen Zahnsparngen kannst du die Aligner von Invisalign Teen herausnehmen und so ein ganz normales Leben führen.

Somit kannst du deine gewohnten Aktivitäten fortsetzen, sei es Sport treiben, ein Instrument spielen, oder essen und trinken. Die Zahnpflege kommt dabei natürlich auch nicht zu kurz.

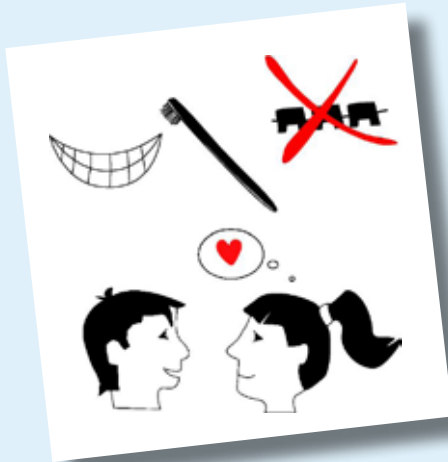

Wie häufig im Leben, kommt es nicht nur darauf an, gut auszusehen. Man muss sich dabei auch wohl fühlen können. Dank der Flexibilität und dem Fehlen von Metalldrähten **lassen sich die Zähne mit Invisalign Teen regelmäßig putzen und mit Zahnseide reinigen. Außerdem werden Zähne und Mund weniger belastet** – die Zeiten von Beschwerden und Reizungen wegen der Metallspangen sind endgültig vorbei.



Bitte lächeln - Du bist im Chat...



☺
CHEESE!!!

Ein toller Tag!



Meine beste Freundin und ich - da gibt's immer was zu lachen

Wie funktioniert Invisalign und was ist gut daran?

Ähnlich wie bei einer Behandlung mit konventionellen Zahnspangen, macht dein Zahnarzt zunächst Fotos, Röntgenbilder und Abdrücke von deinen Zähnen und stellt einen Behandlungsplan auf. Diese Daten werden dann an Align Technology gesendet und dort in eine 3D Digitaldarstellung deiner Zähne umgewandelt. Dies ermöglicht deinem Zahnarzt deinen Behandlungsplan in 3D vom Beginn bis zum Ende fortzusetzen und dir die geplanten Resultate aufzuzeigen. **In anderen Worten, du kannst ein „Designer-Lächeln“ bekommen!**

Nachdem dein virtueller Behandlungsablauf festgelegt worden ist, siehst du die Bewegung deiner Zähne in einer 3D Animation. Eine Reihe von Alignern wird dann für **dich** maßgeschneidert. Die Aligner werden aus leichtem Plastikmaterial hergestellt und sitzen passgenau an deinen Zähnen und werden alle zwei Wochen gegen neue ausgetauscht. Jeder Aligner unterscheidet sich geringfügig vom vorherigen und bewegt deine Zähne sanft in die gewünschte Position sowie in ein Lächeln auf das du stolz sein wirst. Die Länge der Behandlung kann je nach Schwierigkeitsgrad deines Falles variieren und von deinem Zahnarzt bestimmt werden. Im Durchschnitt dauern Fälle etwa 9-18 Monate.

Beginne sofort – frage deinen Zahnarzt ob Invisalign Teen für dich geeignet ist!



FAQs

Was du und deine Eltern
über **Invisalign Teen**
wissen sollten.



Mit Invisalign



Mit Zahnspangen

!
Fragen Sie Ihren
Arzt nach

invisalign | teen

F: Wer kann Invisalign Teen benutzen?

A: Invisalign Teen ist für Patienten mit einem vollständigen bleibenden Gebiss (vollständig durchgebrochene oder durchbrechende hintere Backenzähne) geeignet, also für die meisten Teenager. Es dürfen keine Milchzähne mehr vorhanden sein. Frage einfach deinen Zahnarzt, ob die Behandlung bei dir schon durchgeführt werden kann.

F: Wie lange dauert eine Behandlung mit Invisalign Teen?

A: Die Länge der Behandlung ist vom Schweregrad deiner Fehlstellung abhängig. Dein Zahnarzt kann dir das näher erklären. Im Durchschnitt dauert eine Behandlung 9-18 Monate.

F: Funktioniert Invisalign wirklich?

A: Ja. In Praxen weltweit ist Invisalign bei der Zahnkorrektur von Jugendlichen und Erwachsenen erfolgreich. Über 52.000 Behandler haben bisher fast eine Million Menschen weltweit mit Invisalign behandelt.

F: Welche Vorteile hat eine Behandlung mit Invisalign Teen gegenüber herkömmlichen Zahnspangen?

A: Die normale Zahnpflege lässt sich wie gewohnt – und in einigen Fällen besser – fortsetzen. Außerdem lässt sich ein aktiver Alltag mit Invisalign Teen einfacher gestalten als mit herkömmlichen Zahnspangen. Da die Aligner herausnehmbar sind, kannst du besser Sport treiben, ein Musikinstrument spielen und dein Leben generell sehr viel normaler leben.

F: Ist Invisalign genauso wirksam wie herkömmliche Zahnspangen?

A: In den Händen eines entsprechend ausgebildeten Zahnarztes bzw. Kieferorthopäden ist Invisalign Teen, wenn du die Anweisun-

gen des Arztes genau befolgst, bei den meisten Behandlungsformen genauso wirksam wie herkömmliche Zahnspangen.

F: Was passiert, wenn die Aligner nicht so lange wie empfohlen getragen werden?

A: Invisalign Teen ist dann besonders effektiv, wenn du die Aligner genau nach den Anweisungen des Zahnarztes bzw. Kieferorthopäden trägst. Laut unseren Erfahrungen zeigen die Aligner dann die größte Wirkung, wenn sie jeden Tag 20 bis 22 Stunden lang getragen und alle zwei Wochen bzw. nach den Anweisungen des behandelnden Arztes gewechselt werden. Sie sollten nur zum Essen und zur Zahnpflege herausgenommen werden.

F: Was passiert, wenn ich einen der Aligner verliere?

A: Wenn ein Aligner einmal verloren geht, solltest du sofort deinen Zahnarzt informieren. Dieser entscheidet dann, je nachdem, wie weit die Behandlung fortgeschritten ist, was für dich am besten ist: Entweder trägst du den letzten Satz Aligner, bis der vom Zahnarzt bestellte Ersatz geliefert wird, oder du setzt gleich mit dem nächsten Satz fort.

F: Wie viel Zeit werde ich beim Zahnarzt verbringen müssen?

A: Mit Invisalign Teen sind Zahnarztbesuche in der Regel kürzer als du dir vorstellst. Nach dem ersten Besuch hast du etwa alle vier bis sechs Wochen (oder auf Anweisung des Zahnarztes) einen neuen Termin. Hier prüft der Zahnarzt die Fortschritte und gibt dir den nächsten Satz Aligner.

F: Lassen sich die Zähne mit Invisalign Teen einfach putzen?


A: Ja! Invisalign Teen Aligner können zum Essen und zum Zähneputzen herausgenommen werden. Gute Zahnpflege ist damit sehr viel einfacher als mit herkömmlichen Zahnspangen. Außerdem können sich keine Speisereste hinter Brackets oder Drähten festsetzen, da Invisalign keine Drähte hat und herausgenommen werden kann. Studien haben ergeben, dass mit Invisalign eine deutlich bessere Mundhygiene erreicht wird.*

F: Ich bin 18 Jahre alt. Soll ich Invisalign oder Invisalign Teen verwenden?

A: Diese Frage kann am besten von deinem Zahnarzt beantwortet werden. Selbst wenn du schon andere Invisalign-Produkte tragen kannst, ist nicht ausgeschlossen, dass du von einigen der neuen Eigenschaften von Invisalign Teen profitierst.

**Frag Deinen Arzt am besten noch heute,
was Invisalign Teen für dich tun kann.**

*Effects of Invisalign Aligners on Periodontal Tissues, M.G. Taylor, S.P. McGorray, S. Durrett, S. Pavlow, N. Downey, M. Kenk, D. Oxford, C. Dolce and T.T. Wheeler; University of Florida, Gainesville, USA.

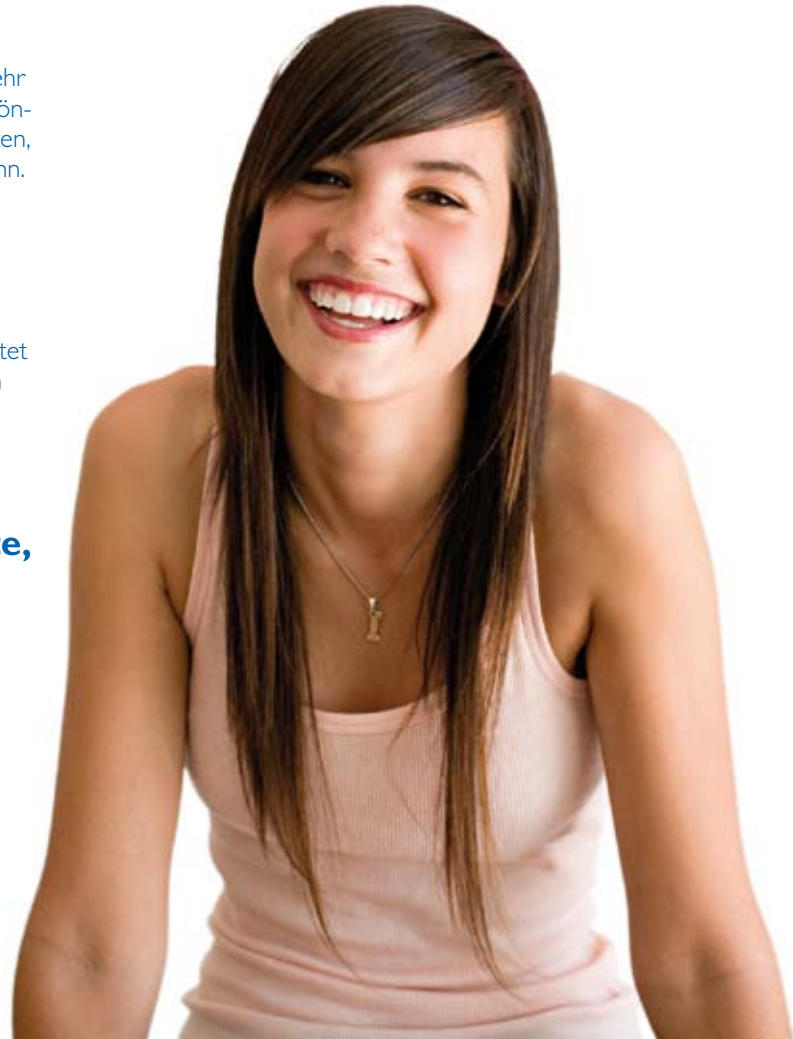

Befreie Dein Lächeln – mach's drahtlos.

Weitere Informationen über Invisalign Teen
bekommst du von deinem Invisalign Behandler:

invisalign | *teen*